

遠赤外線寒天コンディショナー
2ステージフルオートタイプ

遠赤ウォーマー DEC-5

カートリッジタイプ



Pカートリッジシリンジ付き



DEC-5(本体)： **88,000円**

+ Pカートリッジシリンジ： **8,200円**

2点セット価格： 88,000円

遠赤ウォーマー DEC-5



遠赤外線の電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また物性劣化を最小に抑えます。



マイコン制御により、高精度に温度をコントロールします。保存温度55℃～70℃、溶解時間1分～30分の間で変更可能



ボタンをOFFにしている時も予約タイマー時間・溶解保持時間・保存温度等をメモリーしています。
※元電源を落とした場合は、保存温度のみ保持されます。



最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

Pカートリッジシリンジ



耐久性に優れ、オートクレーブにラクラク対応します。

DEC-5仕様 (8本フルオート×2ステージ)

寸法	W120×D150×H95mm	重量	約1.5kg
電圧	AC 100V	周波数	50 / 60Hz

※上記価格は税抜き価格です。
※製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。

製造販売元 (第2種医療機器製造販売業)
製造販売業許可番号：11B2X00019
Clark 株式会社 クラーク
TEL. 048-994-1825 FAX. 048-994-1827
〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2



遠赤ウォーマー DEC-5

カートリッジタイプ



- ▶ 各ステージ(寒天槽)専用のデジタル表示があり、使用状況が一目瞭然。
- ▶ 操作パネルも各ステージ専用であり、隣の槽を誤操作してしまうことはありません。
- ▶ 遠赤外線電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また、物性劣化を最小に抑えます。
- ▶ マイコン制御により、精度の高い温度コントロールを実現しています。
保存温度55°C~70°C、溶解時間1分~30分の間で変更可能。
最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

かんたん操作 ※詳しくは使用説明書をご覧ください。

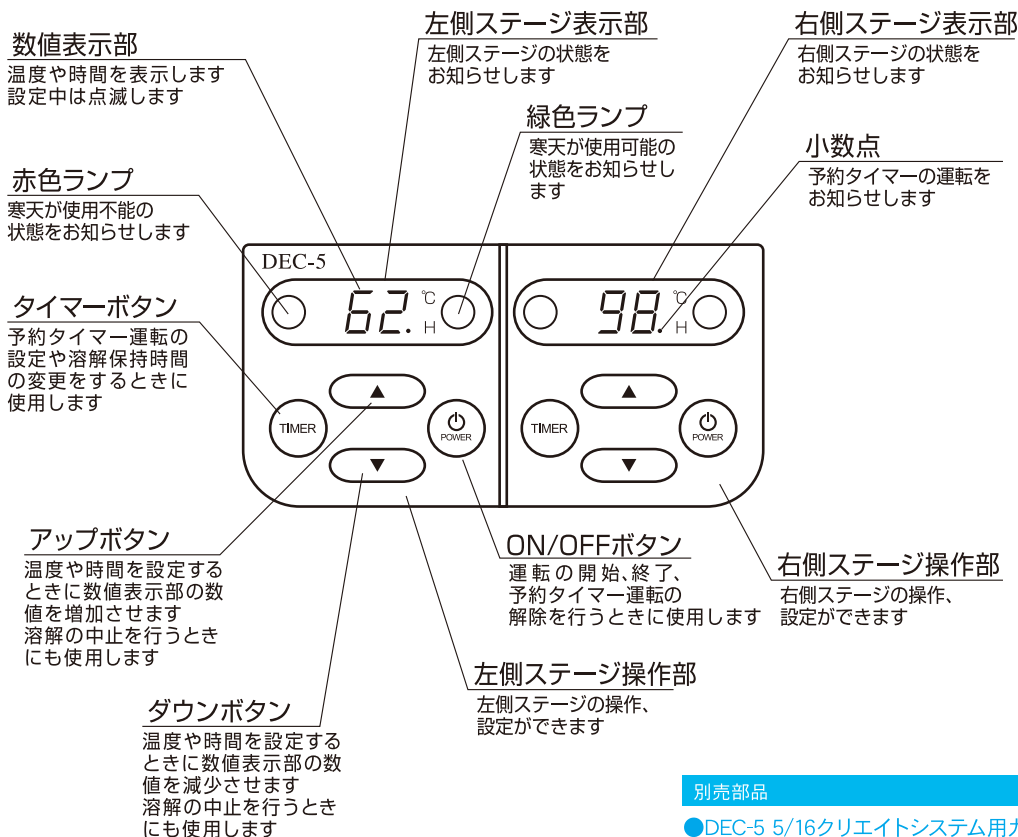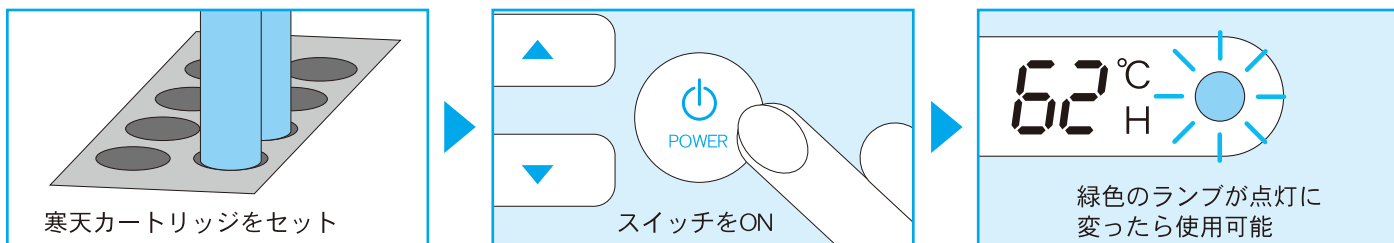

メンテナンス

販売店やメーカーに依頼なくとも寒天槽を清掃できます。

- ①電源プラグをコンセントから抜き、本器を十分に冷ましてください。
- ②プラスドライバーでガイドカバーの止めネジを取外してください。
- ③ガイドカバーを取外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、硬く絞った雑巾で拭いてください。
- ④寒天カートリッジ挿入口内の清掃は、割り箸等挿入口内壁を傷つけない材質の棒状のもので、乾燥した寒天または異物をこすり落として下さい。
- ⑤元通りに組立ててください。

別売部品
●DEC-5 5/16クリエイトシステム用ガイドカバー (8穴×1枚) ￥4,000 (税別)
※ガイドカバーの交換により、5/16クリエイトタイプの寒天コンディショナーとしてお使い頂けます。