


歯科印象採得用器材
リテンションワイヤー

ポストピン


ポスト印象用補強ピン




¥3,200 (税別)

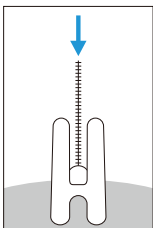


適した太さのピンを孔の深さより長めにカットします。

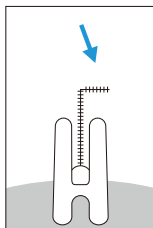


印象材からのピンを抜くため先端を直角に曲げます。

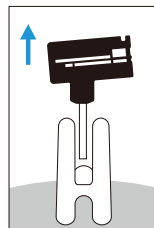

シリンジの針を孔の奥まで入れ、寒天印象材を注入します。

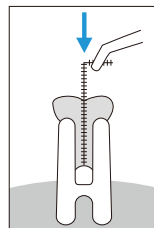

ピンをポスト孔にゆっくりと挿入します。

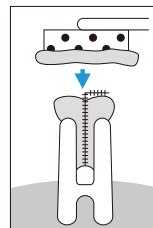

アルジネートを盛ったトレイを圧接し硬化を待ちます。

- ステンレス線にレーヨン繊維を静電植毛しました。
- 植毛の長さは各色共0.5mmです。
- 長さが180mmと経済的です。
- ポスト孔の径に合わせ3種類の太さをご用意しています。
- 各色の径は、ワイヤーの径です。

医療機器届出番号 11B2X00019CL1006

種類	ワイヤーの径	ワイヤーの長さ	植毛の長さ	入数
■ 赤(細)	0.20 φ	180mm	0.5mm	20本
■ 緑(中)	0.25 φ			
■ 黒(太)	0.30 φ			
■ 混合		赤7本、緑7本、黒6本	合計:20本	

※上記価格は税抜き価格です。
※製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。


 株式会社 クラーク
 製造販売元(第2種医療機器製造販売業)
 製造販売業許可番号: 11B2X00019
 TEL. 048-994-1825 FAX. 048-994-1827
 〒340-0832 埼玉県八潮市柳の宮屋敷通223番地2