

歯科材料 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科用印象採得用器材 70887000

## ジンジウェットボトル

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

本品は黄色の乳化液体である。

#### 2. 原材料

ジメチコン・水・香料

#### 3. 原理

本材のジメチコンの消泡効果で歯科用寒天印象材等、親水コロイド印象材の気泡が減少され、流動性延長が起き、採得した印象材内の気泡の軽減及び印象材脱離時の破断が軽減される。

### 【使用目的又は効果】

歯科用寒天印象材等の親水コロイド印象材の使用前に歯牙に塗布する事で、印象材の気泡を減少させ、印象材の流動性の改善を目的とする。結果として印象採得時の破断を軽減し、気泡の無い正確な印象体が採得できる。

### 【使用方法等】

- ① キャップを外す前に本材ボトルをよく振る。
- ② ボトルから数的（塗布する部位に応じた量）を適当な皿等に採る。
- ③ 綿球又はマイクロアプリケーションブラシ等を用いて本材を印象採得する歯牙及びその周囲の歯牙に充分湿潤する様に塗布する。
- ④ 直ちに印象材の操作方法に従って印象採得を行う。（エアや水洗の必要はありません）

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本材は使用前によく振ってから採取すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用上の注意

- ・本材は、印象採得の補助以外に使用しないこと。
- ・万一、眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、専門医（眼科医）の診察を受けさせること。

- ・本材は誤飲しないように注意すること。万一、誤飲した場合には、直ちにうがいし、必要に応じて医師の診断を受けさせること。

#### 2. 重要な基本的注意

- ・本材の使用により発疹、発赤、腫脹、かゆみ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

- ・常温にて貯蔵及び保管すること。
- ・直射日光が当たる場所、高温になる場所に保管しないこと。

#### [有効期間]

- ・製造日から36ヶ月。包装に記載。  
（記載の使用期限は自己認証による）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 クラーク
住所	〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通 223-2
電話番号	048-994-1825