

印象体除菌剤

STERILIZABLE DETERGENT
for impression materials

クリニップ Cleanimp

アルコール系除菌剤スプレー

500ml

今こそみんなで感染対策!!
手軽に本気の除菌ははじめませんか?

水洗いだけでは取り切れない印象体に付着した
ウイルスや細菌を簡単に除菌できます

- 広範囲のウイルス・細菌・カビ類に有効
- 短時間で効果を発揮
- 印象体への影響が少ない
- タンパク・脂質成分の洗浄効果



<使用方法>

- ①印象採得後に付着している血液や唾液を洗い流します。
- ②印象体に本品を直接吹き付けて洗浄します。
- ③15秒後に流水で洗い流します。
(180秒以上放置しない事)

用途

印象体の除菌

アルジネート印象材・寒天印象材・シリコーン印象材

主成分

イソプロパノール・エタノール・イソプロピルメチルフェノール
アルジネート固定材



標準価格:2,800円

 株式会社 クラーク

〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮223-2
TEL.048-994-1825