

歯垢染め出し錠

Made
in
Japan

プラークチェッカー

正しい歯磨きの為に磨き残しをチェック!

簡単

安心


歯垢染め出し錠
Dental plaque stain tablet
CLARK Co.

歯垢をピンク色に染め出してチェック
できます!

タブレットタイプなので手がよごれず、
こぼす心配もありません。



1シート10錠
280円(税別)

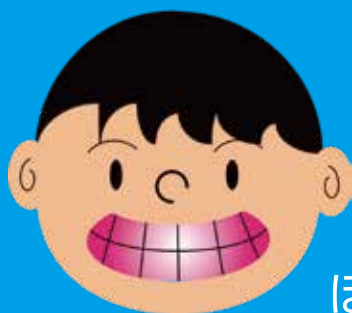

噛んで
染めるだけ!

ほのかなオレンジの甘みでクセが
ないタブレットです。



クラーク

埼玉県八潮市柳之宮223-2
TEL:048-994-1825



歯の汚れ(歯垢)に見える化して正しい歯磨きを！

ご使用方法

- ① 錠剤を口に入れて細かくかみ碎きます。
- ② 舌を使って歯の表面に塗ります。
- ③ 一度軽く口をすすいてください。
- ④ 歯垢が付着しているほど濃く染まります。
- ⑤ ピンク色に染まった部分を磨き直し、口をすすいで終了です。

※正しい歯垢除去が出来る様に定期的(1週間～1ヶ月)に使用する事をお勧めいたします。

ご注意

- ・乳由来及びオレンジ由来成分を使用しています。
- ・衣服に着いた場合。直ちに水洗いしてください。
- ・小さなお子様の手の届かないところへ保管してください。
- ・健康被害はありませんが、意図的に飲み込むことはしないでください。

《成分》

乳糖・結晶セルロース・タルク・ステアリン酸マグネシウム・
サッカリンナトリウム・プロピレングリコース・食用赤色104号・
香料