

印象表面・印象用トレー・矯正用装置等の除菌

ドイツ応用衛生協会
認定品
Listed in DGHM-List

SWISS MADE
SWISS RESEARCH

OCCアセプトプリント スプレー

OCC Switzerland
Oro Clean Chemi AG (スイス)

ASEPTOPRINT® Spray

印象表面をスプレーするだけで除菌！

EBM(Evidence Based Medicine)に基
づいた合理的な院内感染対策が進んでい
るヨーロッパ基準のスイス製除菌剤
印象表面および印象用トレーの除菌

寸法精度に影響を与えず、印象表面および印象用ト
レーを1分間で除菌します！

印象用寒天・アルギン酸系・シリコン系・ポリサルファイ
ド系全ての印象材に使用でき、寸法を変化させること
はありません。

矯正用装置・ワックスバイト・技工用器具・補綴用材料
の除菌にも適しています。

人体、環境に配慮した、アルデヒドやフェノールを含ま
ない製品です。



使用方法

- ①印象表面およびトレー全体にス
プレーしてください。(原液使用)
- ②1分後ていねいに水洗いし、石膏
を注入してください。

※印象材によっては石膏の最適時期が異なりますので、印象材メーカーの指示に従ってください。
※アルカリ、アルコールに耐性のない材料には使用しないでください。



アルデヒドフリー



フェノールフリー

DGHM認証製品(ドイツ衛生微生物学協会認証製品)

主成分

1-プロパノール、4級アンモニウム化合物、エタノール

※右記価格は税抜き価格です。
※製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。

【製造元】



OCC Switzerland
Oro Clean Chemi AG (スイス)



アセプトプリントスプレー(スプレー付き1ℓ) 5,900 円

アセプトプリントスプレー(付替用1ℓ) 5,700 円

※付替用にはお手持ちのOCCアセプトプリント
スプレー付属のスプレーをご使用ください。

【販売元】



製造販売元(第2種医療機器製造販売業)
製造販売業許可番号: 11B2X00019

株式会社 **クラーク**

TEL. 048-994-1825 FAX. 048-994-1827
〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2