

遠赤外線寒天コンディショナー  
2ステージフルオートタイプ

# 遠赤ウォーマー DEC-5

カートリッジタイプ



Pカートリッジシリンジ付き



DEC-5(本体): **99,000 円** (税別)

**プラス** Pカートリッジシリンジ: **8,200 円** (税別)

2点セット価格: **99,000 円** (税別)

## 遠赤ウォーマー DEC-5



遠赤外線の電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また物性劣化を最小に抑えます。



マイコン制御により、高精度に温度をコントロールします。保存温度55℃～70℃、溶解時間1分～30分の間で変更可能



ボタンをOFFにしている時も予約タイマー時間・溶解保持時間・保存温度等をメモリーしています。※元電源を奪とした場合は、保存温度のみ保持されます。



最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

## Pカートリッジシリンジ



耐久性に優れ、オートクレーブにラクラク対応します。

DEC-5仕様 (8本フルオート×2ステージ)

寸 法	W120×D150×H95mm	重 量	約 1.5 kg
電 圧	AC 100V	周波数	50 / 60Hz

※上記価格は税抜き価格です。  
※製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。



製造販売元 (第2種医療機器製造販売業)  
製造販売業許可番号: 11B2X00019

株式会社 **クラーク**

TEL. 048-994-1825 FAX. 048-994-1827  
〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2

# 遠赤ウォーマー DEC-5


## カートリッジタイプ



- ▶ 各ステージ(寒天槽)専用のデジタル表示があり、使用状況が一目瞭然。
  - ▶ 操作パネルも各ステージ専用であり、隣の槽を誤操作してしまうことはありません。
  - ▶ 遠赤外線電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また、物性劣化を最小に抑えます。
  - ▶ マイコン制御により、精度の高い温度コントロールを実現しています。  
保存温度55℃～70℃、溶解時間1分～30分の間で変更可能。
- 最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

### かんたん操作

※詳しくは使用説明書をご覧ください。

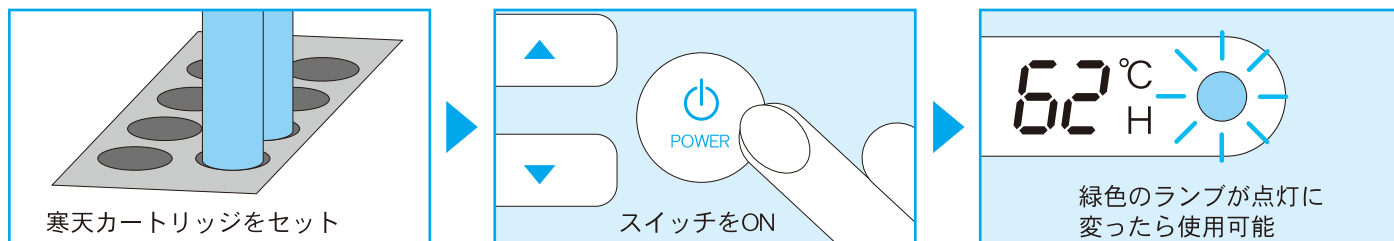

#### 数値表示部

温度や時間を表示します  
設定中は点滅します

#### 赤色ランプ

寒天が使用不能の状態をお知らせします

#### タイマーボタン

予約タイマー運転の設定や溶解保持時間の変更をするときに使用します

#### アップボタン

温度や時間を設定するときに数値表示部の数値を増加させます  
溶解の中止を行うときにも使用します

#### ダウンボタン

温度や時間を設定するときに数値表示部の数値を減少させます  
溶解の中止を行うときにも使用します

#### 左側ステージ表示部

左側ステージの状態をお知らせします

#### 緑色ランプ


寒天が使用可能な状態をお知らせします

#### 右側ステージ表示部

右側ステージの状態をお知らせします

#### 小数点

予約タイマーの運転をお知らせします

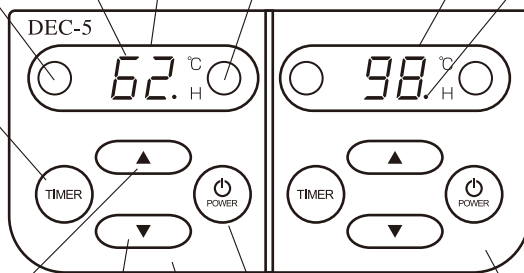

#### ON/OFFボタン

運転の開始、終了、予約タイマー運転の解除を行うときに使用します

#### 左側ステージ操作部

左側ステージの操作、設定ができます

#### 右側ステージ操作部

右側ステージの操作、設定ができます

### メンテナンス

販売店やメーカーに依頼しなくても寒天槽を清掃できます。

- ①電源プラグをコンセントから抜き、本器を十分に冷ましてください。
- ②プラスドライバーでガイドカバーの止めネジを取外してください。
- ③ガイドカバーを取外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、硬く絞った雑巾で拭いてください。
- ④寒天カートリッジ挿入口内の清掃は、割り箸等挿入口内壁を傷つけない材質の棒状のもので、乾燥した寒天または異物をこすり落として下さい。
- ⑤元通りに組立ててください。