

歯科材料 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科用印象採得用器材 70887000

## ジンジウェット

### 【形状・構造及び原理等】

- ・黄色の乳化液体
- ・成分：シメチコン・水・香料
- ・図 1 のカートリッジビンに封入
- ・本材内容物のシメチコンの消泡効果で、印象材の流動性を改善し、印象材の破断が軽減される。

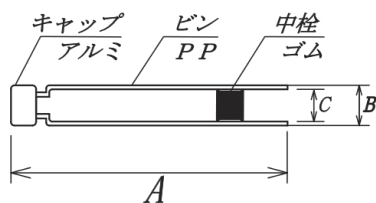


図 1 カートリッジビン

カートリッジビン寸法(単位 mm)

長さ (A)	外形 (B)	内径 (C)	内容量
64±0.5	8.8±0.2	6.8±0.2	1.5ml

### 【使用目的又は効果】

親水コロイド印象材の使用前に歯牙及びその周辺に塗布する事で、印象材の気泡を減少させ、印象材の流動性を改善、採取した印象の破断を軽減するために用いる。

### 【使用方法等】

本材は室温でそのまま使用できます。

- ① 使用前に本材カートリッジをよく振る。
- ② 本材カートリッジを寒天印象材カートリッジ用シリンジにセットする。
- ③ 少量を口腔外で押し出し、出る量を確認する。
- ④ 印象採得を行う歯牙及びその周辺に適量※1の本材を注入塗布する。  
※1 寒天印象材で十分置き換えられる少量
- ⑤ 直ちに印象材の操作方法に従って印象採得を行う。

### 【使用上の注意】

- ・本材は、印象採得補助用以外に使用しないこと。
- ・歯科用寒天印象材、麻酔薬等と取り違わない様に管理すること。
- ・寒天印象材カートリッジ用のシリンジで使用する
- ・寒天印象材より軽い操作感なので注入の際は出し過ぎに十分注意すること。
- ・詰まりの無いシリンジの針を使用すること。詰まりがある針で使用すると負荷がかかり中栓側から漏れる恐れがあります。
- ・寒天印象材と取り違い、寒天ウォーマーにてボイルを行わない様に注意すること。中栓が飛び出す恐れがあります。
- ・1回で使い切らなかった場合、次回の使用は可能ですが、キャップゴム部分からの漏れがないか確認すること。また、衛生面には十分注意すること。
- ・万一、眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、専門医(眼科医)の診察を受けさせること。
- ・製品の性質上、少量の気泡がカートリッジビン内に入っていることがあります。品質、操作に問題はないのでそのままご使用ください。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・常温にて貯蔵及び保管すること。
- ・直射日光が当たる場所、高温になる場所に保管しないこと。
- ・使いかけの本材カートリッジビンは早めに使い切ること。

[有効期間]

包装に記載。

(記載の使用期限は自己認証による)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 クラーク
住所	〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通 223-2
電話番号	048-994-1825